

[www.sw-perfect.com](http://www.sw-perfect.com)



扫一扫公众号  
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号  
获取根管治疗相关知识

深圳市葆丰医疗器械有限公司  
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

邮箱: [likee@dental-perfect.com](mailto:likee@dental-perfect.com)

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103

电话: 0755-28540953 传真: 0755-28540953

生产企业: 汕尾市葆丰医疗器械有限公司

生产地址: 广东省汕尾高新区红草园区西片区三和路南侧29号

20221101

# ZR

perfect®

葆丰

根管预备机

114g =



# AUTO MOTOR

# ZR AUTO MOTOR

[www.sw-perfect.com](http://www.sw-perfect.com)

## 根管预备机

“ZR AUTO MOTOR”是一款专为牙科医生设计，用于驱动根管器械旋转以及往复旋转。临床上应用于根管治疗中的根管成形以及清理。

模式	旋转方式	模式功能
M1-M5	连续旋转	单向旋转，可选择方向顺时针与逆时针。 速度范围150-1000rpm，调节步进值为50rpm。 扭矩范围：0.6-5.0N.cm，调节步进值为0.1N.cm
M6-M8	往复旋转	速度范围：300rpm 角度范围：正转30°，反转150° 正转170°，反转50° 正转50°，反转170°



- 体积小，重量轻，手感好
- 弯机头360°自由转动
- 无线手柄，操作更自如
- 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针
- 37种预设锉程序，快速定位预设程序

更小、更轻、更便捷

外观时尚、技术现代化

无线根管预备马达



### 数字液晶LCD显示屏

屏幕方向可进行180°翻转，适配左右手操作切换。



### 内置预设锉程序

内置不同制造商37种不同锉的程序，速度与扭矩为制造商推荐的范围值，方便使用。

## 自动反转保护功能

在M1~M5模式下，马达单向旋转，当马达负载扭矩达到预设值时，马达会自动反转；当马达负载再次恢复到预设扭矩值的50%时，马达恢复原来的旋转方向。



### 360°可旋转弯机头

弯机头可360°自由旋转，可根据牙位调节方向，灵活多变，医生操作更轻松。



### 大扭矩

扭矩更大，最大扭矩可达5N·cm。